

Houdbaarheid samples voor diagnostiek.

Materialen welke afgenomen zijn ná de komst van de koerier en de volgende dag meegegeven worden, zijn voor sommige bepalingen te oud om deze nog betrouwbaar uit te kunnen voeren.

Hieronder vind u de bepalingen die dan niet meer ingezet kunnen worden.

Bepalingen die volgende dag niet meer bepaald kunnen worden:	Opmerking:
Leukocyten met differentiatie	Afzonderlijk leukocyten en trombocyten kunnen wel.
MCV (inclusief RDW)	Hemoglobine (Hb) kan wel.
Bezinking	
APTT	
PT/INR	
Bilirubine	

Bewaarcondities voor volgende dag:

Buis met licht groene dop centrifugeren en daarna in de koelkast plaatsten.

Buis met gele dop – **eerst een half uur in het rekje laten staan** - daarna centrifugeren en daarna in de koelkast plaatsten.

Zowel de buis met paarse dop als de buis met de grijze dop (glucose) **niet** centrifugeren, maar wel in de koelkast plaatsen tot volgende dag tot de bode komt.